

Nitwits®

RAPIDE, FACILE
ÇA MARCHE!

Trousse de traitement contre
les poux de tête tout-en-un

IMPORTANT UTILISATION PRÉVUE: NITWITS ALL-IN-ONE EST UN DISPOSITIF MÉDICAL CONÇU POUR TUER LES POUX ET LEURS ŒUFS
MODE D'EMPLOI: UTILISER CHEZ LES PATIENTS DE 6 MOIS ET PLUS POUR LE TRAITEMENT DES INFESTATIONS DE POUX
ET D'ŒUFS

MODE D'EMPLOI

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE
COMMENCER L'APPLICATION

PRÉPAREZ

Couvrez les épaules avec une serviette et déverrouillez la buse de pulvérisation en appuyant sur le bouton. Les cheveux doivent être secs.

étape 1: TRAITÉZ

Tenez l'applicateur à 10 cm des cheveux et vaporisez du Nitwits All-In-One jusqu'à ce que les cheveux et le cuir chevelu soient uniformément enduits et saturés.

Massez bien dans le cuir chevelu et dans les cheveux, en vous assurant qu'ils sont uniformément enduits et saturés.

Laissez le traitement dans les cheveux pendant 20 minutes pour vous assurer de tuer les poux et les œufs.

Rincez abondamment les cheveux et shampooinez comme d'habitude.



étape 2 (facultatif) : PEIGNE

Utilisez le peigne fourni pour vous assurer que tous les poux et œufs morts ont été retirés après le traitement. Cela garantira que les cheveux sont entièrement nettoyés.



APRÈS 7 JOURS: Vérifiez à nouveau les cheveux pour s'assurer qu'il n'y a pas de poux de tête. Répétez le traitement si des poux sont détectés.

ADVERTISSEMENTS

Lisez toujours l'étiquette. Utiliser **uniquement** comme indiqué. **Gardez la solution de traitement hors de portée des enfants. Pour usage externe uniquement.** Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer à l'eau. Si les symptômes persistent, consultez votre professionnel de la santé. **Suivez le mode d'emploi, effectuez un test sur une petite zone du cuir chevelu. Si après 24 heures il n'y a aucune réaction indésirable, procéder à une application complète.** Ne pas utiliser sur une peau cassée ou irritée.

NitWits All-In-One n'est pas conçu pour être utilisé avec tout autre appareil. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 mois sans avis médical préalable. En cas d'irritation, cesser l'utilisation. Le produit peut rendre les surfaces glissantes. Faites attention et lavez tout résidu avec de l'eau et du détergent. Conserver à une température inférieure à 30°C. **Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.**

Tout incident grave survenant en relation avec Nitwits All-in-One doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Jetez l'emballage de façon responsable et recyclez-le si possible.

nitwitsforkids.com
pour des informations sur les poux de tête, des conseils et des traitements

Informations de contact

SI&D (Aust) Pty Ltd 29-31 Solent Circuit, Norwest, NSW, 2153 Australia, 1800 888 815
AU: Sponsor: N-Hance Pty Ltd, 29-31 Solent Circuit, Norwest, NSW, 2153
NZ: Distributed by: SI&D (NZ) Ltd, 248 Moorefield Rd, Johnsonville, Wellington, 6037, 0800110257
EC REP Obelis s.a Bd General Wabis 53 1030 Brussels Belgium. Tel:+(32) 2 732-59-54 Fax:+(32)2 732-60-03 mail@obelis.net

IFU prépare le 24 avril 2024



AIO_120_8741FR-LS1-01